



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Infuuskatheter

Eigenschappen


De infuuskatheter

voor de In-Line Port

De infuuskatheter is een flexibele nylon katheter van 18 gauge die rechtstreeks door het septum, de poortkamer en de katheter van de In-Line-poort in het bloedvat kan worden ingebracht. Een luer kan worden aangesloten op het proximale uiteinde van de infuuskatheter voor dosering en monsternamen. Deze configuratie kan de doorgankelijkheid op lange termijn verhogen doordat de infuuskatheter wanneer nodig vervangen kan worden door enkel een trocanaal en een nieuwe infuuskatheter door het septum van de In-Line-poort in te brengen.

Hoe de infuuskatheter werkt

- geen herhaalde chirurgie om geocludeerde katheter te vervangen
- verlengt de doorgankelijkheid
- voorkomt dat de naald wordt 'losgelopen'

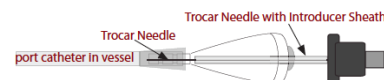

A. Breng het trocarinbrengsysteem (meegeleverd met de infuuskatheter) ver genoeg in het poortseptum in zodat het tot in de aansluitpin van de uitlaat reikt.

B. Verwijder enkel de naald en schuif de infuuskatheter door de inbrenghuls die in het septum in positie blijft.

C. Schuif de infuuskatheter door de huls en door de bloedvatkatheter in het bloedvat. De infuuskatheter dient langer te zijn dan de bloedvatkatheter. Verwijder de huls.

D. Sluit een Luer Stub Adaptor aan op de infuuskatheter om naaldloos te infunderen of te aspireren.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be