



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Clearport (Titanium Vascular Acces Ports)



Specificaties

Model	CP2/CP2AC - large	CP4/CP4AC - medium	CP6/CP6AC - small
Formaat & materiaal	large, titanium	medium, titanium	small, titanium
Diersoorten	honden, varkens, schapen	honden, varkens, primaten	primaten, konijnen, katten
Gewicht	14 g	8 g	3 g
Inhoud	0,84 cc	0,36 cc	0,10 cc
Hoogte	1,3 cm	1,0 cm	0,8 cm
Opening septum	1,2 cm	0,9 cm	0,6 cm
Voetafdruk	2,9 cm	2,3 cm	1,7 cm
Katheterconfiguratie	De poorten kunnen worden besteld met een vooraf bevestigde of met een bevestigbare katheter (AC, te bevestigen tijdens de ingreep)		
Kathetermaterialen	De poorten kunnen worden besteld met een katheter van 2-9 Ch uit silicone, polyurethaan, Intisil (silicone met ronde tip) of Hydrocoat (polyurethaan met Hydromer-coating en ronde tip). Om complicaties te minimaliseren dient de kleinst mogelijke diameter te worden gebruikt.		
Afkortingen kathetermaterialen	H - Polyurethaan katheter met Hydromer-coating en ronde tip I - Intisil silicone katheter met ronde tip PR - Polyurethaan katheter met ronde tip		

Eigenschappen

Voordelen van de ClearPort Betere resultaten

Van het ronde design van de poortkamer werd in de menselijke geneeskunde bewezen dat het de doorgankelijkheid verlengt en infectie vermindert: Stevens

B. et al. "A Randomized, Prospective of Conventional Ports vs. The



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

*"Clear-flow" ReservoirPort in adult oncology patients." JVAD zomer 2000.
(JVAD is het officiële tijdschrift van de Association for Vascular Access).*

Ronde poortkamer

- Beperkt dode ruimte enhoeken
- Minimaliseert afzetting*
- Helpt occlusies en infecties te verminderen

Tangentiële KATHETER uitgang

- Verbetert destromingsdynamica
- Reinigt de helekamer
- Zorgt voor een completerespoeling

** Deze afzetting wordt gevormd door gestold bloed en geneesmiddelenresten in de kamer.*

Dankzij de ronde vorm van de kamer komt het hele oppervlak ervan in contact met de vloeistof, wat de dode ruimte helpt te beperken, afzetting tegengaat en het aantal occlusies en infecties vermindert.

De uitgang van de katheter is tangentieel in plaats van loodrecht om een kolkende spoeling te bekomen en zo de hele poortkamer grondig te reinigen.


Bestelinformatie

Vermeld het catalogusnummer voor het model van de ClearPort (CP2, CP4 of CP6) en de katheterconfiguratie (vooraf bevestigd of bevestigbaar), de Franse maat, het materiaal en de tipconfiguratie die vereist zijn.

Bijvoorbeeld: het catalogusnummer voor onze kleine ClearPort CP6 met een polyurethaan katheter van 3,5 Ch met Hydromer-coating die tijdens de ingreep wordt bevestigd, is: CP6AC-3.5H. (CP6: kleine ClearPort, AC - attachable catheter, 3.5H: polyurethaan katheter van 3,5 Ch met Hydromer coating)

De katheters worden op verzoek voorzien van retentieringen. Ze zijn 24"/60 cm lang, tenzij anders opgegeven. Informatie over de materialen en modificaties van de katheters vindt u verder in deze catalogus.

admin@carfil.be

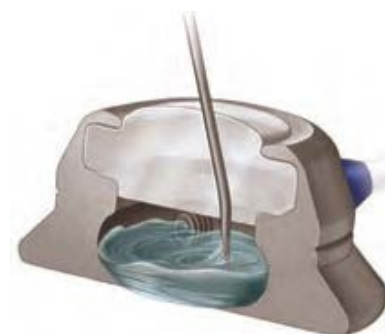

PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be